

Установка и запуск ПО:

1) Проверить ПК на соответствие минимальным требованиям

- процессор – не менее Intel Core i3, 2.3 Ghz или аналог
- оперативная память - Не менее 4Гб
- видеокарта – NVIDIA GeForce GT 540M или аналог,
- свободное место на диске - Не менее 3 Гб.
- разъем Ethernet (или Wi-Fi адаптер)
- Монитор, разрешение - 1280x720
- Клавиатура - наличие
- Компьютерная мышь - наличие
- Операционная система - Windows 10, 11

2) Скачать архив программы.

3) Распаковать архив в любое удобное место

4) Запустить XR-clinic.exe

Управление в симуляторе:

Взаимодействия с интерфейсом при помощи нажатия ЛКМ (левой кнопкой мыши)

- Пригласить пациента в кабинет
- Сесть пациенту, если он в кабинете
- Встать пациенту посреди кабинета
- Лечь пациенту на спину
  
- Отправить пациента на обследования (пойдет сначала одеваться, если не одет)
- Отправить пациента одеться
- Отправить пациента раздеться

Взаимодействие с интерактивными предметами (медицинскими приборами) на столе  
При помощи ЛКМ:

- Взаимодействие с фонендоскопом
- Взаимодействие с тонометром
- Взаимодействие с пульсоксиметром
- Взаимодействие с глюкометром
- Взаимодействие с термометром

Взаимодействие с пациентом при помощи ЛКМ:

- Провести аускультацию (если взят фонендоскоп)
- Провести пальпацию (перейти в режим проведения пальпации)
- Провести перкуссию (перейти в режим проведения перкуссии)

Этапы симуляции:

Выбрать клинический случай

Пригласить пациента (окно на мониторе)

Провести опрос пациента

Провести осмотр пациента

На мониторе назначить диагноз, в соответствии с проведенным осмотром.

Назначить лечение.

Ознакомиться с оценкой прохождения симуляционной сессии.

ESC – Завершение симуляции