

**Руководство пользователя по работе с
«XR-clinic»**

**Виртуальный симуляционный комплекс для формирования навыков
клинического мышления**

Содержание

1	Комплектация "XR-Clinic" и системные требования	3
2	Скачивание актуальной версии приложения "XR-Clinic"	4
3	Подготовка и запуск симулятора	4
4	Контактная информация	6

1. Необходимая комплектация для работы "XR-Clinic"*



Компьютер соответствующий минимальным системным требованиям**

Также входит в комплектацию:

Комплект кабелей и блоков питания для подключения и заряда соответствующих устройств.

** Внешний вид оборудования может отличаться в зависимости от комплектации*

****Минимальные системные требования для "XR-Clinic" Desktop:**

- процессор – не менее Intel Core i3, 2.3 Ghz или аналог
- оперативная память - Не менее 4Гб
- видеокарта – NVIDIA GeForce GT 540M или аналог,
- свободное место на диске - Не менее 3 Гб.
- разъем Ethernet (или Wi-Fi адаптер)
- Монитор, разрешение - 1280x720
- Клавиатура - наличие
- Компьютерная мышь - наличие
- Операционная система - Windows 10, 11

2. Скачивание актуальной версии приложения "XR-Clinic" на ваш персональный компьютер:

2.1. Перейдите по ссылке:

https://drive.google.com/file/d/1A-OD06Spiezco_A7uBXRI0mQLhT4ltn8/view
(xr-clinic.exe)

2.2. Подтвердите желание скачать .exe файл


2.3. Разместите .exe файл в нужную вам папку на компьютере

3. Подготовка и запуск симулятора

3.1. Откройте файл "xr-clinic.exe"

3.2. Разрешите запуск файла для firewall или антивируса, если потребуется.

3.3. После открытия файла, запустится приложение "xr-clinic" и появится интерфейс выбора клинического случая

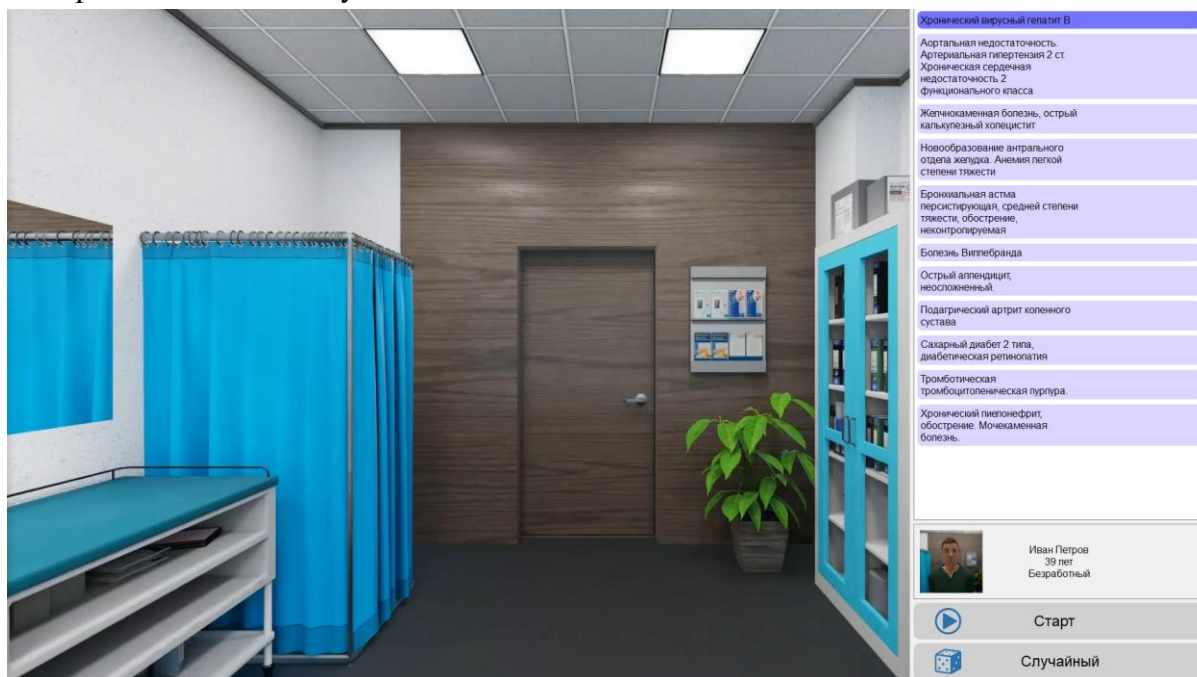

3.4. Далее выберите клинический случай.


Хронический вирусный гепатит В


Аортальная недостаточность.
Артериальная гипертензия 2 ст.
Хроническая сердечная недостаточность 2 функционального класса


Желчнокаменная болезнь, острый калькулезный холецистит

Новообразование антрального отдела желудка. Анемия легкой степени тяжести


3.4. Нажмите “Старт”

 Иван Петров
39 лет
Безработный

 Старт

 Случайный

3.5. После этого в кабинет войдет пациент и вы сможете с ним начать взаимодействие

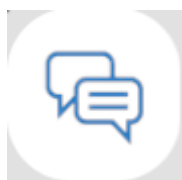


Диалог - позволяет пользователю задавать пациенту различные вопросы о его заболевании, ответ будет показан в окне справа внизу.

Положение -
пациента, чтобы



пользователь выбирает необходимое положение для провести осмотр.

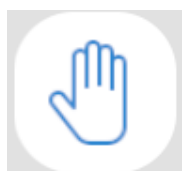

перкуссия,
Результат

Действия - пользователь выбирает необходимое действие, чтобы провести осмотр (пальпация, аускультация).

будет показан в окне справа внизу.




Обследования - пользователь назначает необходимые дополнительные обследования для пациента.
Результат будет показан в окне справа внизу.

Диагноз -
также выбрать



пользователь может поставить диагноз пациенту, а для него лечение

3.6. После определения диагноза и назначения лечения, необходимо нажать кнопку «Завершить»;

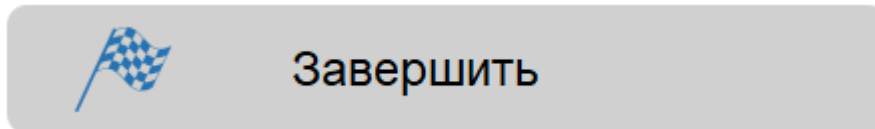

3.7. В появившемся меню отображаются подробности и итоговый балл.

Правильный диагноз:
Хронический вирусный гепатит В с исходом в цирроз печени. Синдром портальной гипертензии, асцит.


Выбранный диагноз:
Неалкогольная жировая болезнь печени

Правильное лечение:
Срочная госпитализация в инфекционное отделение.

Выбранное лечение:
Периндоприл в форме таблеток. Дозировка 4мг 2 раза в сутки 7 дней.

Ваш результат:
0 %

После завершения сессии можно начать новую, либо закрыть приложение "xr-clinic" нажав кнопку "Esc" на клавиатуре вашего ПК.

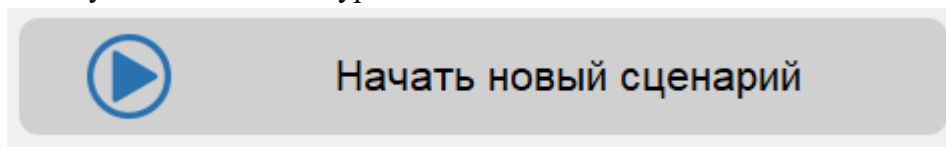

4. Контактная информация

При возникновении проблем, не описанных в данной инструкции, обратиться по e-mail service@medvr.pro, ООО «Медвиар» www.medvr.pro

Производитель: ООО «Медвиар»

Юридический адрес: 121205, г. Москва, территория инновационного центра Сколково, Большой бульвар д. 42, строение 1, помещение 154, место 4